

## Protocoles IHC optimaux MSH6 (cancer du côlon)

Protocoles techniques IHC ayant donné des résultats optimaux au test d'évaluation externe de la qualité de 2016.

Anticorps	Automate	Dilution	Temps d'incubation	Démasquage		Révélation
				Tampon	Durée	
<b>44 (Ventana)</b> (n=2)	Ventana Benchmark Ultra	Pré-dilué	24 min	CC1	72 min	optiView
			28 min	CC1	long <sup>1</sup>	optiView
<b>EP49 (Dako)</b> (n=1)	Ventana Benchmark Ultra	Pré-dilué	60 min	CC1	long <sup>1</sup>	ultraView

<sup>1</sup>Démasquage long = 90 minutes.